

Vejledning til "Datastudio" installation

03.01.11

AA-CI 6883 DRIV

'DATASTUDIO' INSTALLATION

Programinstallation

1. Isæt CDROM og vælg "Installer Datastudio". Følg anvisningerne indtil programmet er installeret.

Registrering

2. Start Datastudio. Der vises et skærmbillede, hvor man kan angive en licensnøgle.
3. Ønsker du at anvende Datastudio Lite (gratis, men begrænset programversion, samt 90 dages adgang til den fulde programversion) trykkes på knappen "Indtast Datastudio Lite key" (misvisende oversættelse!), hvorefter programmet er klar til brug.
4. Ønsker du at anvende Datastudio i en licenseret version, indtastes serienummeret og licensnøglen i felterne nederst, hvorefter der trykkes på knappen "Anvend".

VIGTIGT:

Licensnøglen findes på indersiden af det registreringeskort, der er vedlagt CDROM'en.

5. Programmet er nu installeret og klar til brug.

Driverinstallation

6. Isæt herefter en Passport enhed (XPlorer, GLX, USB-link) med sensor i den USB-port, der skal anvendes.
7. Tænd Passport-enheten
8. Windows præsenterer informationsboksen "Ny hardware fundet...".
9. Når der spørges efter placeringen af driveren til enheden, vælges den mulighed, der hedder "Angiv selv en placering". Programmet skal ikke lede på Internettet eller på CDROM.

10. Tryk herefter på knappen "Gennemse" til højre for tekstfeltet, og vælg den mappe, hvor programmets drivere er installeret (typisk "C:\Programmer\Datastudio\Driver").

11. Følg instruktionerne til driveren er installeret.

Programopdatering

12. På www.pasco.com kan hentes programopdateringer. Disse installeres automatisk oveni eksisterende programversioner, ligesom firmwaren i de ydre enheder (XPlorer, XPlorer GLX) automatisk opdateres første gang enheden forbindes til computeren efter programopdateringen.

